

Требования, предъявляемые к качеству Биологического материала

Тип Биологического материала:

Защечный (буккальный) эпителий.

Состав набора для взятия защечного эпителия:

- зонд защечный со щеточкой, 2 шт.;
- бумажный конверт для сбора и транспортировки образцов, 1 шт.;

Общие рекомендации:

Взятие биологических образцов защечного (буккального) эпителия осуществляется с внутренней стороны щеки с использованием одноразовых зондов.

Постарайтесь воздержаться от еды, питья, рассасывания лекарственных средств, а также курения не менее чем в течение 2 часов до сбора образцов.

У грудных детей, находящихся на грудном вскармливании, образцы следует брать через 30 мин после кормления. Непосредственно перед взятием образца младенцу необходимо дать попить воды из бутылочки.

Процедура взятия биологического материала:

Непосредственно перед взятием образцов, тщательно прополощите рот чистой водой без использования гигиенических средств для полости рта. Наденьте одноразовые перчатки. Аккуратно извлеките зонд из упаковки. Постарайтесь не дотрагиваться до щетки на конце зонда. Сглотните слюну и сделайте щеточкой **10-20 круговых движений** по внутренней поверхности обеих щек. Извлеките зонд из ротовой полости, поместите его в сухой конверт. Повторите эту процедуру вторым зондом. Запечатайте конверт.

- *Для исключения взаимного переноса биологического материала, образцы каждого физического лица должны быть в отдельных конвертах!*

Маркировка: на конверте должна быть четко и разборчиво нанесена следующая информация, идентифицирующая образец биологического материала:

- Фамилия, имя, отчество, пациента;
- пол и возраст пациента;
- штрих-код медицинского учреждения (если таковой имеется);
- код панели, для исследования
- номер телефона
- адрес электронной почты

Условия хранения и транспортировки: особых условий не требуется.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание неопределенного результата генетические исследования не проводятся:

- после пересадки костного мозга, стволовых клеток, органов и тканей;
- после процедуры переливания крови в течение 3-х месяцев после проведения процедуры.